

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом

Состав

Компоненты:

Олигомерные метакрилаты, диоксид кремния, стеклокерамика

Количественное содержание в % масс. / масс.:

23 % - олигомерные метакрилаты

4 % - наполнители миди

65 % - мини

8 % - нано

Назначение продукта

Competence Universal представляет собой светоотверждаемый рентгеноконтрастный универсальный композитный материал.

Показания к применению

Реставрация полостей всех классов

Противопоказания

Применение противопоказано в случае невозможности дренажа или соблюдения предписанной техники нанесения. Не наносить непосредственно на открытую пульпу и при наличии аллергических реакций на компоненты препарата.

Характеристики

Competence Universal представляет собой универсальный светоотверждаемый композит.

Специальные меры предосторожности

нет

Способ применения

1. Перед препарированием произвести гигиеническую чистку, а затем удалить все остатки очищающих материалов с помощью водного спрея. Определить цвет по шкале VITA. Рекомендуется использование коффердама.
2. Подготовить полость в соответствии с общими правилами адгезивной техники. Сформировать скошенные края эмали и защитить область пульпы.
3. При необходимости выполнить протравливание в соответствии с выбранной вами техникой, например, техникой тотального протравливания. Следуйте инструкциям по применению используемого материала.
4. Нанести бондинг (например, C-Bond).
5. В случае необходимости нанести в качестве прокладки тонкий слой жидкотекучего композитного материала (Competence Flow) или копромера. Рекомендуется использовать матрицу.
6. Заполнить полость слоями композита выбранного цвета толщиной не более 2 мм. Каждый слой необходимо полимеризировать в течение 20 секунд.
7. Удалить излишки, придать форму и выполнить финирирование с использованием мелкозернистых алмазных и гибких дисков. Отполировать до сухого блеска с использованием полировочной пасты (например, Vision Paste) с помощью полировочных чаш и дисков.

Рекомендации по применению:

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

Меры предосторожности / остаточные риски**Важные указания**

- Полимеризационные лампы должны генерировать поток с длиной волны 450нм, при этом лампы необходимо регулярно проверять. Полимеризационную лампу необходимо размещать как можно ближе к композиционному материалу.
- Не удаляйте кислородно-ингибированный слой, так как он необходим для сцепления со следующим слоем.
- Необходимо соблюдать инструкции по применению других материалов, используемых с Competence Universal.

ВНИМАНИЕ!

Вспомогательные средства для нанесения препарата (канюли, одноразовые кисточки и т.д.), предназначены только для однократного использования, т.е. только для использования на одном пациенте!

Возможные побочные эффекты

На сегодняшний день информация о возможных побочных эффектах отсутствует. В отдельных случаях не исключена повышенная чувствительность к компонентам материала. Избегать контакта пасты с кожей. При случайном попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы.

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Избегать влаги и воздуха с содержанием масла, в также материалов, содержащих эвгенол, поскольку они могут отрицательно сказаться на процессе полимеризации. При использовании катионных ополаскивателей для полости рта, средств для удаления зубного налета или хлоргексидина возможно изменение цвета.

Условия хранения

Хранить в сухом месте. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Плотно закрывать шприцы сразу же после использования, чтобы материал не затвердел под воздействием окружающего света.

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

- REFWP4250: Competence Universal, Набор из 4 шприцев по 4,5 г различных цветов по шкале Vita® (A2, A3, A3.5, B2), C-Bond объемом 10 мл, Extra Gel объемом 2 мл, Glass-Liner объемом 2 мл + аксессуары
- REFWP4251: Competence Universal, Набор из 4 шприцев по 4,5 г различных цветов по шкале Vita® (A2, A3, A3.5, C2), C-Bond объемом 10 мл, Extra Gel объемом 2 мл, Glass-Liner объемом 2 мл + аксессуары
- REFWP4346: Competence Universal, Набор из 4 шприцев по 4,5 г различных цветов по шкале Vita® (A2, A3, A3.5, A3 opak), C-Bond объемом 10 мл, Extra Gel объемом 2 мл, Glass-Liner объемом 2 мл + аксессуары
- REFWP4388: Competence Universal, Набор из 4 шприцев по 4,5 г различных цветов по шкале Vita® (A2, A3, A3.5, A2 opak), C-Bond объемом 5 мл, Extra Gel объемом 2 мл, Glass-Liner объемом 2 мл + аксессуары
- REFWP4252: Competence Universal, Refill, A1, 4,5 г
- REFWP4253: Competence Universal, Refill, A2, 4,5 г
- REFWP4254: Competence Universal, Refill, A3, 4,5 г
- REFWP4255: Competence Universal, Refill, A3.5, 4,5 г
- REFWP4088: Competence Universal, Refill, A4, 4,5 г
- REFWP4294: Competence Universal, Refill, B1 4,5 г
- REFWP4256: Competence Universal, Refill, B2 4,5 г
- REFWP4264: Competence Universal, Refill, B3 4,5 г
- REFWP4257: Competence Universal, Refill, C2 4,5 г
- REFWP4266: Competence Universal, Refill, C3, 4,5 г
- REFWP4265: Competence Universal, Refill, D2, 4,5 г
- REFWP4258: Competence Universal, Refill, D3, 4,5 г
- REFWP4260: Competence Universal, Refill, A2 opak, 4,5 г
- REFWP4259: Competence Universal, Refill, A3 opak, 4,5 г
- REFWP4261: Competence Universal, Refill, Incisal, 4,5 г
- REFWP4267: Competence Universal, Refill, B2 opak, 4,5 г
- REFWP9055: Competence Universal, Refill, BXL, 4,5 г
- REFWP4349: Competence Universal, Набор, 1 шприц A3 объемом 4,5 г, 1 флакон C-Bond объемом 10 мл
- REFWP4397: Competence Universal, Refill, Bleach, 4,5 г
- REFWP4391: Competence Universal, Refill, 0M1, 4,5 г
- REFWP4392: Competence Universal, Refill, 0M2, 4,5 г
- REFWP4393: Competence Universal, Refill, 0M3, 4,5 г

Утилизация

Неиспользованный материал после отверждения в результате испарения можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государственной власти, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: + (49) 41 23/9225-0
Fax: + (49) 41 23/9225-48

www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: + (49) 41 23/9228-0
Fax: + (49) 41 23/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Danger Danger

Made in Germany

CE 0482

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

26.03.2024
2024-REV-021