

WP PerfectPrint -flexibel[®]

для моделей

Инструкция по применению

Общая информация

WP PerfectPrint -flexibel – это светоотверждаемая смола на основе метакрилата, фотоинициаторов, пигментов и добавок для использования в зуботехнической лаборатории. Предназначена для SLA 3D-принтеров, работающих на длине волны 405 нм.

Предполагаемое использование

Изготовление моделей зубного ряда по технологии 3D-печати.

Специальные меры предосторожности

- Несоблюдение инструкций и неправильное использование могут привести к ухудшению качества.
- Во время работы надевайте защитные перчатки, защитную одежду и защитные очки. Не допускайте попадания в глаза! При случайном попадании жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и при необходимости обратитесь к врачу.
- Избегайте прямого контакта кожи с жидкостью и компонентами перед последующим отверждением.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Побочные эффекты

- Раздражение глаз и кожи.
- Полимеризованный материал не следует использовать при наличии аллергии на какой-либо из ингредиентов или в случае контактной аллергии.
- В редких случаях возможно возникновение аллергических реакций на компоненты WP Perfect-Print -flexible-. Избегайте вдыхания паров мономера и контакта кожи с неполимеризованными материалами.

Указания по использованию

- Перед использованием встряхивайте флакон не менее одной минуты.
- При заполнении формы смолой соблюдайте инструкции производителя устройства.
- Обратите внимание на температуру производства, указанную производителем устройства. Смолу также можно обрабатывать при комнатной температуре. Слегка затемните помещение, прежде чем снимать печатную платформу с напечатанным объектом. Затем откройте крышку и извлеките печатную платформу с напечатанным объектом.
- Снимите напечатанный объект с платформы. Снимайте опорные элементы только после очистки и последующего отверждения.

Повторное использование смолы

- После просеивания (удаления полимеризованных частиц) с помощью сита из металлической сетки (около 200 мкм) использованную смолу можно смешать со свежей смолой в соотношении 1:1 и использовать повторно.

Постобработка напечатанного объекта

- Протирайте напечатанный объект этанолом или мягкой щеткой не более 3 минут.
- Дополнительно: очистите напечатанный объект в отдельном контейнере свежим этанолом в ультразвуковой ванне при необходимости (5–10 минут).
- Дополнительно: очистите отверстия и зазоры сжатым воздухом.

Последующая экспозиция напечатанного объекта

Рекомендуется предварительно отверждать напечатанный объект с каждой стороны в течение 20 минут в устройстве для отверждения ультрафиолетовым светом (UVA) с 4 лампами по 9 Вт каждая. Обратите внимание на информацию, предоставленную производителем устройства.

Ограничения по использованию

- Продукция предназначена исключительно для создания моделей зубного ряда в стоматологии.
- Не допускать непосредственного контакта с пациентом.






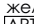
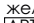
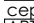
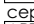
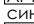
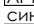
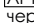
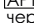
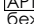

Состав

Смесь акрилатных и метакрилатных смол, фотоинициаторов, пигментов и добавок.

Хранение и срок годности

- Хранить при комнатной температуре / 0–22 °C в темном, сухом месте.
- Используйте WP PerfectPrint -flexible - как можно быстрее, чтобы уменьшить воздействие дневного света / комнатного освещения. Чрезмерное воздействие света приводит к нежелательному затвердению материала.
- Закрывайте контейнер сразу после каждого использования и храните его плотно закрытым.
- Не используйте после истечения срока годности!

Упаковка

-  WP5145 WP PerfectPrint -flexible-, белый, 1000 г
-  WP5146 WP PerfectPrint -flexible-, белый, 500 г
-  WP5148 WP PerfectPrint -flexible-, розовый, 1000 г
-  WP5149 WP PerfectPrint -flexible-, розовый, 500 г
-  WP5151 WP PerfectPrint -flexible-, желтый, 1000 г
-  WP5152 WP PerfectPrint -flexible-, желтый, 500 г
-  WP5153 WP PerfectPrint -flexible-, серый, 1000 г
-  WP5154 WP PerfectPrint -flexible-, серый, 500 г
-  WP5155 WP PerfectPrint -flexible-, синий, 1000 г
-  WP5156 WP PerfectPrint -flexible-, синий, 500 г
-  WP5157 WP PerfectPrint -flexible-, черный, 1000 г
-  WP5158 WP PerfectPrint -flexible-, черный, 500 г
-  WP5163 WP PerfectPrint -flexible-, бежевый, 1000 г
-  WP5164 WP PerfectPrint -flexible-, бежевый, 500 г
-  WP5170 WP PerfectPrint -flexible-, желтый опаловый (непрозрачный), 1000 г

 **dent a pharm**
Produktionsgesellschaft mbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: + (49) 41 23/9225-0
Fax: + (49) 41 23/9225-48

www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: + (49) 41 23/9228-0
Fax: + (49) 41 23/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H315 Вызывает раздражение кожи

26.03.2024
2024-REV-003

