

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом, зубным техником

Состав

Компоненты:

порошок пемзы, глицерин, сульфат кальция, силикат алюминия, полисахариды, ароматизатор, краситель

Количественное содержание:

60 % - глицерина,

33 % - порошка пемзы

Назначение продукта

Vision Prophy Paste — это универсальная полировочная паста на основе порошка пемзы.

Показания к применению

- чистка перед процессом отбеливания
- профессиональная чистка и полировка зубов
- полировка реставраций из пластика и драгоценных металлов
- полировка коронок и пломб

Противопоказания

Не применять у пациентов с аллергией на любой из компонентов.

Характеристики

Полирует поверхности (эмаль, пластмассы, металлы).

Специальные меры предосторожности

нет

Способ применения

Открыть баночку с пастой, взять необходимое количество пасты. Баночку необходимо сразу же закрыть. Нанести небольшое количество пасты на щетку или полировочную чашечку. Не смешивать с водой. Нанести на поверхность зубов или полируемых материалов. По возможности использовать небольшую скорость вращения. После полировки пациент должен тщательно прополоскать рот. Полированные материалы необходимо промыть водой.

Предостережения и меры предосторожности**Остаточные риски**

Пациенту и стоматологу рекомендуется надеть защитные очки. Препарат следует использовать только в соответствии с показаниями к использованию. В случае использования препарата перед последующим процессом отбеливания необходимо полностью удалить остатки препарата, иначе это отрицательно скажется на результате отбеливания.

Возможные побочные эффекты

На сегодняшний день информация о возможных побочных эффектах отсутствует. При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы.

Взаимодействие с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Хранить при температуре 0°C - 22°C.


Появление осадка или высыхание материала не влияют на его качество и эффективность.

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

 WP6120 Vision Prophy Paste со вкусом корицы, 160,0 г

 WP6139 Vision Prophy Paste со вкусом клубники, 160,0 г

 WP6140 Vision Prophy Paste со вкусом лимона, 160,0 г

Утилизация

Неиспользованный материал можно утилизировать с бытовыми отходами.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

 **dent a pharm**
Produktionsgesellschaft mbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9225-0

Fax: +(49) 4123/9225-48

www.dent-a-pharm.de

info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9228-0

Fax: +(49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de

info@wp-dental.de



Made in Germany



H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию

26.03.2024

2024-REV-005