

Re-Cord®

Инструкция по применению

Целевая группа пациентов

Применяется для лечения у женщин и мужчин, независимо от возраста, в том числе у детей.

Использование

Применяется исключительно в стоматологии.

Описание

Ретракционная вязаная нить из 100 %-го хлопка.

Показания к применению

Для смещения и ретракции десневой ткани.

Противопоказания

Не рекомендуется применять на воспаленных деснах.

Клиническая польза

Получение стоматологических слепков для изготовления коронок или мостов. Установка глубоких или пришеечных пломб.

Функциональные характеристики продукта

Необычная структура в виде многочисленных крошечных петель, образующих взаимосвязанную цепочку, обеспечивает равномерное постоянное давление на пришеечную область десны. Благодаря особому вязаному строению нить Re-Cord обеспечивает превосходное смещение тканей и лучше удерживается в десневой бороздке по сравнению с обычными ретракционными нитями.

Нить Re-Cord также обладает превосходными кровоостанавливающими свойствами, так как впитывает значительно больше гемостатических средств, чем обычные нити.

- Размеры № 2 и иногда № 3 подходят для моляров.
- Размер № 1 часто применяется для премоляров и верхних зубов.
- Размеры №№ 0 или 00 часто используются для нижних передних зубов.
- Нить размером № 000 используется для препарирования под виниры или в процессе цементирования, а также в случае тонких, плотно прилегающих десневых бороздок. Нить данного размера также применяется в качестве нижней нити в технике «двойной паковки». В случае необходимости и в зависимости от характера тканей и желаемого свободного пространства используемый размер нити может отличаться от указанного выше.

Особые указания

Ретракционные нити в упаковке находятся в спрессованной форме. Выбирайте нить на один размер больше ожидаемого.

Применение

1. Подберите подходящий размер ретракционной нити.
2. Используйте стопор, чтобы ввести ретракционную нить в десневую бороздку.
3. После введения ретракционной нити промойте пораженные участки. Оптимальное смещение ткани происходит за 1–3 минуты.
4. Удалите ретракционную нить из десневой бороздки перед снятием слепка. Аккуратно промойте водой, чтобы удалить продукт и проверить действие гемостатического средства.

Меры предосторожности / остаточные риски

Отсутствуют

Хранение

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Минимальный срок годности

3 года при условии надлежащего хранения. См. на внешней упаковке.

Размеры

Ретракционные нити представлены в разных размерах

[REF]WP4921, размер № 000

- Препарирование под виниры и цементирование
- Восстановительное лечение тонких тканей, склонных к разрыву

[REF]WP4915, размер № 00 / **[REF]WP4916**, размер № 0

- Нижние передние зубы
- Фиксация виниров близко к десневой или поддесневой области
- Реставрации классов III, IV + V
- Вторая нить в технике «двойной паковки»

[REF]WP4917, размер № 1

- Размеры 1 и 2 особенно эффективны для контроля и/или ретракции тканей после пропитки в гемостатическом растворе до или после препарирования под коронки
- Использование в качестве защитной нити перед препарированием на передних зубах

[REF]WP4918, размер № 2

- Верхняя нить в технике «двойной паковки»
- Защитная нить перед препарированием на передних зубах

[REF]WP4919, набор нитей каждого их размеров №№ 00, 0, 1, 2

Утилизация

Продукт следует утилизировать надлежащим образом в соответствии с местными официальными предписаниями. Незагрязненную упаковку можно отправить на переработку.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.