

Инструкция по применению

Целевая группа:
дети и подростки

Предназначено для использования
врачом-стоматологом

Состав
Компоненты:
фторид натрия, бис-(гидроксиэтил)-аминопропил-N-гидроксиэтил-октадециламин дигидрофторид, дисперсия метакрилата на водной основе

Количественное содержание:
бис-(гидроксиэтил)-аминопропил-N-гидроксиэтил-октадециламин дигидрофторид 0,15 % в пересчете на чистый фторид

Назначение продукта
Фторирование зубной эмали

Показания к применению
Aquafluor представляет собой лак, используемый для фторирования зубной эмали и десенсibilизации чувствительных зубов.

Противопоказания
Не применять у пациентов с аллергией на метакрилаты.

Характеристики
После нанесения дисперсии на эмаль и сушки воздухом образуется пленка, при растворении которой выделяется фтор.

Специальные меры предосторожности
нет

Описание
Aquafluor представляет собою дисперсию, высыхающую под воздействием воздуха и образующую на эмали и дентине тонкую пленку. При длительном контакте со слюной или водой происходит размягчение пленки. Это позволяет фторидам, содержащимся в полимерной матрице, проникать в поверхность дентина или эмали и оказывать там свое воздействие. Благодаря этому процессу достаточно минимального количества фтора для оптимального фторирования поверхности зубов. После полного размягчения лака процесс высвобождения фтора завершается. После этого матрица лака отделяется от поверхности эмали или дентина.

Способ применения
Очистить и, по возможности, подсушить обрабатываемые поверхности. Нанести несколько капель Aquafluor на кисть (встряхивание флакона с дисперсией не требуется), а затем тонким слоем нанести на обрабатываемую поверхность. Тщательно и осторожно просушить, желательнее теплым воздухом, до образования полимерной пленки и ее полного высыхания. Не чистить зубы в течение 24 часов после обработки. При правильном применении полимерный слой остается на поверхности зуба до полного размягчения пленки и выделения максимального количества фтора.

ВНИМАНИЕ!
Вспомогательные средства для нанесения препарата (канюли, одноразовые кисточки и т.д.), предназначены только для однократного использования, т.е. только для использования на одном пациенте!

Продолжительность применения
Для профилактики кариеса обработку следует проводить 2-3 раза в год, при повышенном риске появления кариеса - 3-4 раза в год.

Предостережения и меры предосторожности
Остаточные риски

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

Возможные побочные эффекты

При правильном нанесении и использовании препарата побочные эффекты встречаются крайне редко. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы. Мы отслеживаем каждое сообщение.

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Хранить при температуре 0°C - 22°C.

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

REF WP4005 1 флакон объемом 5,0 мл жидкость + 50 кисточек
REF WP4004 1 флакон объемом 10,0 мл жидкость
REF WP4949 1 флакон объемом 5,0 мл жидкость со вкусом клубники + 50 кисточек
REF WP4948 1 флакон объемом 10,0 мл жидкость со вкусом клубники

Утилизация

Неиспользованную жидкость разбавить водой и утилизировать с бытовыми отходами. Затвердевшие остатки также можно утилизировать с бытовыми отходами.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государственной, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany

