

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом

Состав

Компоненты:

олигомерные метакрилаты, фторид натрия, камфорхинон, неорганические наполнители

Количественное содержание в % масс. / масс.:

79 % - метакрилаты,

20 % - неорганические наполнители,

1 % - фторид натрия

Назначение продукта

Fisseal представляет собой композитный светоотверждаемый материал для покрытия фиссур.

Показания к применению

Fisseal представляет собой композитный светоотверждаемый материал для покрытия фиссур. Препарат предназначен для герметизации ямок и фиссур с целью профилактики кариеса.

Противопоказания

Препарат содержит метакрилаты.

Не применять у пациентов с аллергией на любой из компонентов.

Характеристики

Композитный материал полимеризуется под воздействием света.

Специальные меры предосторожности

нет

Способ применения

1. Тщательно очистить поверхность и нанести на неё протравочный гель (на базе ортофосфорной кислоты), синий цвет которого способствует точному и равномерному нанесению. Оставить протравочный гель для воздействия не менее чем на 60 секунд

Время протравки эмали "молодых" зубов" можно сократить до 30 секунд, а время протравки бесприменной или фторированной эмали увеличить до 120 секунд. После протравки обрабатываемую поверхность необходимо тщательно промыть большим количеством воды. Хорошо высушить запечатываемую поверхность. Протравленная эмаль должна иметь молочно-белый цвет или цвет белой извести. После высыхания следует избегать контакта с жидкостями.

2. Нанести одну каплю препарата на стекло для смешивания, затем нанести кисточкой тонким слоем на протравленные поверхности. Полимеризировать в течение 20–30 секунд с помощью полимеризационной лампы. Полимеризационная лампа должна генерировать поток мощностью 500 мВт/см² с длиной волны 450 нм, при этом лампу необходимо регулярно проверять. Полимеризационную лампу необходимо размещать как можно ближе к композиционному материалу. После полимеризации проверить окклюзию.

Предостережения и меры предосторожности**Остаточные риски**

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

Возможные побочные эффекты

При правильном нанесении и использовании препарата побочные эффекты встречаются крайне редко. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы. Мы отслеживаем каждое сообщение.

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Хранить при температуре 0°C - 22°C.

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

[REF]WP4170 Fisseal, белого цвета

2 шприца объемом по 2,0 мл + 1 шприц Extra Gel объемом 2,0 мл + канюли

Утилизация

Неиспользованный материал можно утилизировать в полимеризованном и непolyмеризованном виде как отходы метакрилата.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48

www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany

CE 0482

H315 Вызывает раздражение кожи
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз

26.03.2024
2024-REV-011