

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом

Состав

Компоненты:
нитроцеллюлоза, триэтилцитрат, этилацетат

Количественное содержание в % масс.: / масс.:

нитроцеллюлоза 15

Назначение продукта

Защитный лак

Показания к применению

Secura Varnish предназначен для запечатывания поверхности стеклоиономерного пломбирочного цемента

Противопоказания

Не использовать при аллергии на один из компонентов.

Характеристики

Самозатвердевающий запечатывающий лак на базе нитроцеллюлозы.

Специальные меры предосторожности

нет

Способ применения

Хорошо очистить обрабатываемую поверхность и просушить теплым воздухом. Нанести несколько капель Secura Varnish на инструмент, а затем быстро нанести лак на обрабатываемую поверхность. Просушить поверхность теплым воздухом в течение 30 секунд, затем нанести лак повторно.

Предостережения и меры предосторожности**Остаточные риски**

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

Возможные побочные эффекты

На сегодняшний день информация о возможных побочных эффектах отсутствует. В отдельных случаях не исключена повышенная чувствительность к компонентам материала. Избегать контакта с кожей. При случайном попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы.

Случаи передозировки неизвестны.

Риски при использовании: не использовать вблизи открытого пламени! Продукт легко воспламеним.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие продукта и его метаболитов с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Во избежание изменения консистенции препарата флакон с лаком необходимо закрывать сразу после применения.

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

REFWP4099 1 флакон с жидкостью объемом 10,0 мл

Утилизация

Неиспользованный материал после отверждения в результате испарения можно утилизировать вместе с бытовыми отходами

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Warning

Danger

Warning

Danger

Made in Germany



H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
H224 Чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость и пар
H336 Может вызывать сонливость или головокружение

26.03.2024
2024-REV-011