

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом

Состав

Компоненты:

Биосовместимые:

гидроксид кальция, вода, сульфат бария, гидроксизетилцеллюлоза

Количественное содержание:

Компоненты (количество в соответствии с биосовместимостью):

45 % - гидроксид кальция,

5 % - сульфат бария

Назначение продукта

Calcident 450 представляет собой пастообразную суспензию на водной основе, содержащую гидроксид кальция.

Показания к применению

Лечение безкариозного дентина вблизи пульпы, лечение глубокого кариеса, прямое и непрямое покрытие пульпы, пульпотомия, временная пломбировка каналов

Противопоказания

Применение Calcident 450 противопоказано: при вскрытии / обнажении пульпы при кариозном поражении дентина, при воспалительных изменениях пульпы, при повышенной чувствительности к одному из компонентов препарата.

Характеристики

Подщелачивание гидроксидом кальция

Специальные меры предосторожности

нет

Способ применения

Количество вводимого препарата Calcident 450 зависит от конкретной области применения.

1. Лечение глубокого кариеса / непрямое покрытие пульпы - Calcident 450 в виде тонкой пленки нанести на дно полости без давления. После этого поставить временную или постоянную пломбу.
2. Прямое покрытие пульпы - после подсушивания обрабатываемой поверхности нанести Calcident 450, затем закрыть зуб, поставив соответствующую пломбу.
3. Витальная ампутиация пульпы - Calcident 450 создает благоприятные условия для заживления оставшейся культи благодаря общепризнанному местному прижигающему действию гидроксида кальция на остаточную пульпу.
4. Прокладка / защита пульпы - компактный рентгеноконтрастный Calcident 450 образует тонкий изолирующий слой белого цвета, защищающий пульпу от цементных кислот и свободных мономеров, в том числе, в области передних зубов под силикатными или пластмассовыми пломбами.
5. Дентин-повязка для обточенных витальных зубов - Calcident 450 наносится на препарированную культю зуба кисточкой или ватным тампоном и тщательно подсушивается потоком теплого воздуха. Следует избегать контакта с десной. Кисточку следует предварительно обмакнуть в кипяченую или дистиллированную воду, чтобы немного разбавить пасту.
6. Медицинская вкладка в инфицированные корневые каналы. Паста Calcident 450 закладывается в каждый корневой канал, при этом необходимо проследить за тем, чтобы не было пузырьков воздуха. При необходимости вкладку можно заменить через 6-8 недель.

Предостережения и меры предосторожности**Остаточные риски**

Шприцы с Calcident 450 хранить плотно закрытыми.

При нанесении избегать давления на открытую пульпу. Гидроксид кальция вызывает местное раздражающее и разъедающее действие на кожу, глаза и слизистую оболочку. Частицы гидроксида кальция, попавшие на роговицу или в область глаз, немедленно удалить механическим способом, а затем сразу же тщательно промыть водой.

Не использовать после истечения срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте.

Возможные побочные эффекты

Побочные эффекты неизвестны. Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие продукта и его метаболитов с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15° С до 23° С.

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

[REF]WP4200 1 шприц с пастой объемом 2,0 мл + канюли

[REF]WP4201 2 шприца с пастой объемом 2,0 мл + канюли

Утилизация

Неиспользованный материал можно утилизировать с бытовыми отходами.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48

www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Danger
Danger

Made in Germany

CE 0482

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
H335 Может вызывать раздражение
дыхательных путей

26.03.2024
2024-REV-013