

## Инструкция по применению

**Целевая группа:**

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

**Предназначено для использования**

врачом-стоматологом

**Состав**

Компоненты:

Сульфат кальция, оксид цинка, этилцеллюлоза

Количественное содержание:

60 % - сульфат кальция

15 % - оксид цинка

**Назначение продукта**

Материал для временных пломб

**Показания к применению**

Временное, кратковременное закрытие полостей.

**Противопоказания**

нет

**Характеристики**

Пломбирочный материал, самозатвердевающий.

**Специальные меры предосторожности**

нет

**Способ применения**

С помощью пломбирочного инструмента ввести необходимое количество Dent-a-Cav в увлажненную полость. Процесс затвердевания начнется через несколько минут после нанесения материала. После этого необходимо на 15 минут воздержаться от внешнего воздействия в области обработки. Для облегчения процесса удаления материала не рекомендуется полное пломбирование глубоких полостей. При нанесении материала в области вкладок следует избегать давления на них.

Для удаления затвердевшего материала рекомендуется использовать короткий зонд с заостренным концом, который необходимо вставить между дентином и краем пломбы.

**Предостережения и меры предосторожности****Остаточные риски**

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

**Возможные побочные эффекты**

Взаимодействие с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Взаимодействие с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

**Условия хранения**

Закрывать флакон сразу после использования. Срок годности закрытого флакона: см. этикетку.

Срок хранения флакона после вскрытия составляет не менее 6 месяцев. Хранить при температуре 0°C - 22°C.

**Срок годности**

Не использовать после истечения срока годности.

Примечание о возможном отклонении от розового цвета

Отклонения в цвете не являются дефектом и не влияют на функциональность, пригодность и безопасность препарата.

**Формы выпуска**

**REF** WP4311 2 стеклянных баночки по 30,0 г, розового цвета

**REF** WP4312 2 стеклянных баночки по 30,0 г, белого цвета

**REF** WP5627 1 стеклянная баночка 30,0 г розового цвета

**REF** WP5628 1 стеклянная баночка 30,0 г белого цвета

**Утилизация**

Неиспользованный материал можно утилизировать с бытовыми отходами.

**О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.**



We know how

**dent a pharm**  
Produktionsgesellschaft mbH  
Schusterring 35  
25355 Barmstedt/Germany  
Fon: +(49) 4123/9225-0  
Fax: +(49) 4123/9225-48  
www.dent-a-pharm.de  
info@dent-a-pharm.de



**Willmann & Pein GmbH**  
Schusterring 35  
25355 Barmstedt/Germany  
Fon: +(49) 4123/9228-0  
Fax: +(49) 4123/9228-49  
www.wp-dental.de  
info@wp-dental.de



Attention Warning

Made in Germany

CE 0482

H315 Вызывает раздражение кожи  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз  
H411 Токсично для водных организмов  
с долгосрочными последствиями

26.03.2024  
2024-REV-019