

WP Occlusion

Description:

WP Occlusion is a very fine spray with peppermint odour used to make contact points in prosthetic works visible. The product is only recommended for use in the dental laboratory.

Properties:

- Very fine spray
- Mikro-thin pigmentation film
- Agreeable peppermint odour

Advantages:

- Simple handling
- Easy dosage
- Very good marking of the occlusion
- Easy to remove
- Spray-can can be emptied entirely, as the pigments do not remain in the can

Indication:

To mark the contact points during the making of prosthetic restorations

Storage conditions: dry and protected from light at 0 - 22 °C

Shelf life: 3 years

Presentation:

WP5110: WP Occlusion, green, spray, 75 ml spray can



WP Occlusion

Спрей окклюзионный 75,0 мл

АПТ WP5110

Описание:

Сверхтонкий спрей-маркер для определения контактных точек и поверхностей в стоматологии

Способ применения:

Хорошо встряхните флакон перед использованием! Распылите тонким слоем на необходимую поверхность с расстояния приблизительно 2–5 см.

Окклюзионный спрей распыляется на область, обследуемую на наличие точек окклюзии, в результате чего распыляемая область покрывается тонким слоем пигмента. Цветная пигментная пленка не оставляет следов и легко удаляется водой.

Инструкции по технике безопасности:

H222 - H229 Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.

Баллон под давлением: возможность взрыва при нагревании.

Хранить в недоступном для детей месте.

Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей.

Не курить.

Не распылять вблизи открытого огня или другого источника воспламенения.

Баллон под давлением: не прокалывать и не сжигать даже после использования.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.

Беречь от воздействия света. Не подвергать воздействию температур, превышающих 50 °C/122 °F.

Не распылять в рот!

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль!

